



Zbog korištenja cjevčice s balonom, pacijent će morati koristiti dužu/visoko izlaznu vrećicu za stomu

Intubacijski dio The Insides Tube je 8 cm. Pazljivo palpajte distalni trakt kako biste bili sigurni da je intubacija sigurna. Razmislite o korištenju duže cijevi s balonom kako bi se žaruja mogla zadržati ispod fascije

Razmislite o korištenju duge, ravne cijevi s balonom bez manšete veličine najmanje 20 Fr. Cijev bi trebala udobno pristajati unutar vrećice za stomu i ne bi trebala biti previše smotana.

Za podršku u postavljanju terapije rane negativnim tlakom u kombinaciji sa sustavom The Insides, obratite se kliničkom timu.

Nakon rehabilitacije distalnog crijeva, preporučuje se povećati veličinu sonde na The Insides 20 Fr Tube za učinkovito ponovno hranjenje

Instalirajte The Insides 22 Fr Tube

Instalirajte The Insides 28 Fr Tube

Pacijent nije prikladan za korištenje sustava The Insides System sve dok kavitet nije plitak i nema minimalnog nakupljanja himusa. Predlaže se svakodnevna ručna reinfuzija himusa od ~200 ml kako bi se distalni dio crijeva održao rehabilitiranim dok ne budu spremni za korištenje Insides sustava

Nakon što je rana oko EAF-a plitka, slijedite ovu tablicu za donošenje odluka kako biste vodili izbor cijevi

Sjajno! Molimo mijenjajte The Insides Tube svakog mjeseca dok je pacijent na terapiji.

Je li The Insides Tube ispio?

Podržite pacijenta da postane samostalan mijenjanjem vrećice za stomu bez izvlačenja The Insides Tube. Molimo ponovno umetnite novu The Insides Tube.

Je li pacijent slučajno izvukao Insides Tube kad mijenja aparat za stomu?

Razmislite o korištenju kratke, ravne cijevi s balonom bez manšete veličine najmanje 20 Fr.

Fascija je vjerojatno preširoka da drži žaruju usidrenom. Razgovarajte s kliničkim timom The Insides Company o mogućnostima zadržavanja The Insides Tube na licu mjesta.

Ispada li The Insides Tube kada pacijent ustane ili hoda?

Razmotrite ravnu cjevčicu s balonom bez manšete koja je najmanje 20 Fr. Najbolje je da se cijev značajno ne namota u aparatu za stomu kako bi se smanjio rad Insides Divera

Redovito pregledavajte cijev kako biste bili sigurni da odgovara namjeni kako pacijent napreduje, rana zacjeljuje i približava se sigurnom zatvaranju EAF-a

Ovo je vjerojatno peristaltički grč koji gura The Insides Tube van. Ponovno umetnite novu cijev The Insides i podprite pacijenta da nadzire dok se ne smiri. Strogo se preporučuje pacijentu da drži The Insides Tube na retencijskom rukavcu tijekom reinfuzije kako bi The Insides Tube bio stabilan.

Je li The Insides Tube ispio između 2-5 dana nakon pokretanja sustava The Insides?

Nisam siguran? Molimo razgovarajte s kliničkim timom tvrtke Insides

