

# Référence communautaire

Nom du patient:

Identifiant de santé du patient :

## Formulaire de transfert de soins

Ce patient utilise le système The Insides<sup>®</sup> pour effectuer une thérapie de réinjection de chyme. Ceci pour éviter la déshydratation, le déséquilibre électrolytique et pour qu'ils puissent se rééduquer à domicile avant la chirurgie de fermeture.

Le système Insides<sup>®</sup> est une thérapie gérée par le patient qui se compose de trois composants, la pompe Insides<sup>®</sup> (pompe), le tube Insides<sup>®</sup> (tube) et le pilote Insides<sup>®</sup> (pilote). Le tube est intubé dans la sortie distale de la stomie. La pompe est un petit accessoire qui glisse sur l'extrémité du tube et est immergé dans le chyme qui s'écoule normalement depuis la sortie proximale vers un appareil de stomie. La pompe est une pompe centrifuge contenant un aimant et est changée par le patient tous les 3 jours. Le pilote est également un appareil portable doté d'un aimant. La pompe se couple magnétiquement au pilote, via l'appareil de stomie, lorsqu'un bolus est indiqué.

- Veuillez vous inscrire et suivre la formation en ligne de 30 minutes. Celui-ci est accessible sur le site Web de The Insides<sup>®</sup> Company, sous *Formation*, ou en cliquant sur ce lien : <https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home>  
(Le manuel d'instructions d'utilisation se trouve dans le kit système du patient).

- Le prochain kit de recharge mensuel doit être commandé avant le (Date :) \_\_\_\_\_

- Le tube est changé tous les 28 jours par un professionnel de santé qualifié.

Le tube doit ensuite être changé (Date :) \_\_\_\_\_

- Le patient utilise (veuillez encercler) le tube Insides ou autre (identifier le tube et la taille) \_\_\_\_\_
  - Le changement de tube sera effectué dans une clinique externe ou à domicile (veuillez encercler)
- Test sanguin rénal dû (Date :) \_\_\_\_\_
  - Une infirmière diplômée, compétente dans The Insides<sup>®</sup> Le système doit examiner le patient à domicile (Date) : \_\_\_\_\_

Pour commander le kit de recharge, veuillez contacter : \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Pour obtenir une assistance clinique et technique, veuillez visiter le site Web de The Insides<sup>®</sup> Company, sous *Contact*, ou contacter votre stomologue local de The Insides Company, Nom : \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_