

# Referência da comunidade

Nome do paciente: \_\_\_\_\_

Identificador de saúde do paciente: \_\_\_\_\_

## Formulário de transferência de cuidados

Este paciente está usando o Sistema Insides<sup>®</sup> para realizar terapia de reinfusão de quimo. Isso para evitar desidratação, desequilíbrio eletrolítico e para que possam se reabilitar em casa antes da cirurgia de fechamento.

O Sistema Insides<sup>®</sup> é uma terapia gerenciada pelo paciente que é composta por três componentes, a Bomba Insides<sup>®</sup> (bomba), o Tubo Insides<sup>®</sup> (tubo) e o Driver Insides<sup>®</sup> (driver). O tubo é intubado na saída distal da ostomia. A bomba é um pequeno acessório que desliza na extremidade do tubo e fica submerso no quimo que descarrega normalmente da saída proximal para um aparelho de ostomia. A bomba é uma bomba centrífuga com um ímã inserido e é trocada pelo paciente a cada 3 dias. O driver também é um dispositivo portátil com um ímã. A bomba acopla-se magneticamente ao acionador, através do aparelho de ostomia, quando há indicação de bolus.

- Por favor, registre-se e conclua o treinamento on-line de 30 minutos. Isso pode ser acessado no site da The Insides<sup>®</sup> Company, em *Treinamento*, ou clicando neste link: <https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home> (O manual de instruções de uso está localizado no kit do sistema do paciente).
- O próximo kit de recarga mensal precisa ser solicitado até (Data:) \_\_\_\_\_
- O tubo é trocado a cada 28 dias por profissional de saúde treinado.  
O tubo será o próximo a ser trocado (Data:) \_\_\_\_\_
  - O paciente está usando (circule) o tubo interno ou outro (identifique o tubo e o tamanho) \_\_\_\_\_
  - A troca da sonda será realizada em Ambulatório ou em Domicílio (favor circular)
- Exame de sangue renal devido (Data:) \_\_\_\_\_
- Uma enfermeira registrada, competente em The Insides<sup>®</sup> Sistema, precisa avaliar o paciente em casa (Data): \_\_\_\_\_

Para solicitar o kit Refil, entre em contato com: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Para suporte clínico e técnico, visite o site da The Insides<sup>®</sup> Company, em *Contato*, ou entre em contato com seu estomaterapeuta local da The Insides Company, Nome: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_