


# The Inside®

## Neo

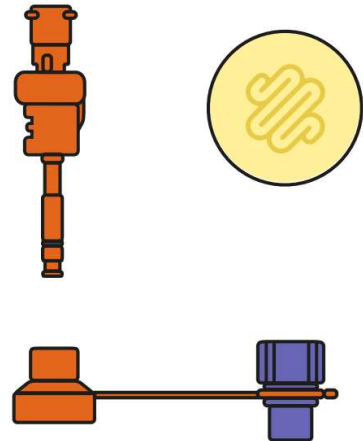

### Guia para a terapia de reinfusão do quimo com The Insides® neo


Este folheto responde a perguntas que você possa ter sobre a terapia de reinfusão de quimo. Ele explica o processo, como o Insides® Neo é colocado e como funciona a terapia de reinfusão do quimo. Este folheto descreve os benefícios e riscos da terapia de reinfusão do quimo. Se tiver alguma dúvida ou preocupação depois de ler este folheto, fale com a sua equipe de cuidados de saúde.

#### O que é a terapia de reinfusão do quimo?


Quimo é o termo médico para o líquido marrom/verde/amarelo que vem do estoma do bebê. É o líquido aquoso ou polposco visto no aparelho de ostomia. O quimo é composto de todos os fluidos e eletrólitos consumidos e sucos digestivos que o corpo adiciona para ajudar a quebrar o fluido. O quimo mantém o corpo hidratado, nutrido e funcionando.

Seu bebê tem um estoma em algum lugar ao longo do intestino delgado. Isso significa que o quimo deixa o corpo mais cedo do que o esperado e não passa pelo resto do intestino, onde parte do quimo normalmente seria absorvido. Isso os coloca em maior risco de ficarem desidratados e desnutridos.


A terapia de reinfusão do quimo é um método de tratamento para pacientes com estoma. A terapia de reinfusão do quimo envolve o retorno do quimo do aparelho de ostomia, de volta ao restante dos intestinos distais através do segundo orifício do estoma. Devolver o quimo ao corpo dá ao resto do intestino a chance de absorver os nutrientes valiosos para mantê-lo hidratado e nutrido. Esta terapia está em uso há mais de 40 anos e tem sido amplamente pesquisada.

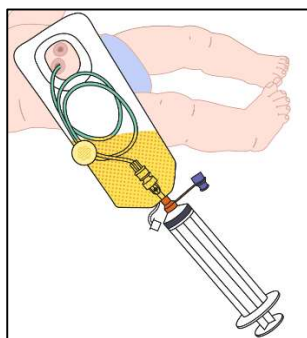

Conectar

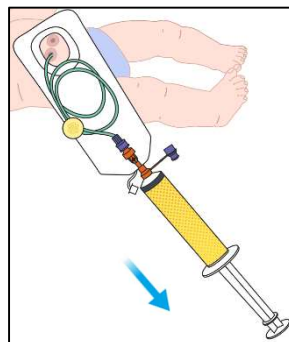

Retirar

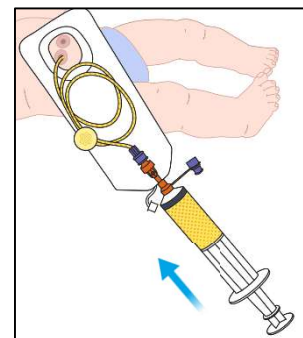

reinfundir

## Como a terapia de reinfusão do quimo ajuda

A pesquisa mostra que a terapia de reinfusão de quimo traz benefícios para a manutenção da saúde intestinal, mantém o bebê hidratado e bem nutrido e prepara melhor o intestino para a reversão do estoma.

A realização da terapia de reinfusão do quimo pode:

- Mantenha a parte restante do intestino funcionando e reabilitada. Sem a terapia de reinfusão do quimo, ele começará a encolher devido à falta de uso. A reinfusão do quimo mantém o intestino saudável para que comece a funcionar imediatamente após a cirurgia de reversão do estoma.
- Manter a saúde de todo o trato digestivo. A terapia de reinfusão de quimo pode reduzir a necessidade de fluidos intravenosos (IV). O quimo contém os nutrientes do leite materno e outros fluidos administrados, o que ajudará a manter os sistemas do corpo equilibrados e reduz o risco de danos nos rins.
- Se for necessário suporte nutricional IV, a reinfusão do quimo estimula o fígado a continuar funcionando, produzindo as enzimas digestivas necessárias para decompor alimentos e líquidos, o que reduz o risco de danos hepáticos a longo prazo.
- Ajude seu bebê a ter movimentos intestinais regulares novamente.

## Riscos da terapia de reinfusão do quimo

A terapia de reinfusão de quimo usando The Insides® Neo envolve risco mínimo. Alguma irritação da pele pode ocorrer ao redor do aparelho de ostomia, mas esses eventos devem ser minimizados porque o aparelho de ostomia está firmemente aderido ao dispositivo.

## Posso Recusar?

É sua escolha usar a terapia de reinfusão de quimo com seu bebê ou não. Se você escolher a terapia de reinfusão de quimo, precisará fornecer consentimento à sua equipe de saúde para iniciar este tratamento. Optar por não fornecer consentimento não afetará seu tratamento geral e você continuará recebendo atendimento especializado de sua equipe de saúde. Se você optar por não reinfundir o quimo, existem outras opções de tratamento disponíveis envolvendo medicamentos intravenosos para manter seu bebê nutrido e prepará-lo para a reversão do estoma.

## Realizando a terapia de reinfusão do quimo

A terapia de reinfusão do quimo pode ser feita de duas maneiras: manualmente ou com um dispositivo médico chamado The Insides® Neo.

Uma enfermeira no hospital realiza terapia manual de reinfusão de quimo. Um aparelho de ostomia é modificado cortando um orifício na frente do aparelho de ostomia para enfiar o tubo. O quimo é esvaziado do aparelho de ostomia, esvaziando-o em uma caixa e, em seguida, aspirado para uma seringa. Um tubo é inserido no orifício cortado no aparelho de ostomia e, em seguida, no orifício a jusante do estoma sempre que a terapia de reinfusão de quimo é indicada. Em seguida, é injetado no tubo. Este processo é concluído várias vezes ao dia. A frequência com que a enfermeira precisa fazer isso depende de quanto quimo é passado para o aparelho de ostomia.

Alternativamente, a terapia de reinfusão de quimo pode ser feita usando The Insides® Neo (explicado abaixo).

## O que é The Insides® Neo?

The Insides® Neo é um dispositivo médico que realiza terapia de reinfusão de quimo. O dispositivo é um dispositivo de válvula onde o quimo é aspirado através do Invólucro e reinfundido através do Invólucro, no tubo de alimentação e a jusante. O Insides® Neo é composto por três partes e quando o aparelho de ostomia precisa ser trocado, ele é configurado da seguinte forma:

- **Habitação** - O tubo de alimentação é conectado ao Invólucro e é rosqueado no aparelho de ostomia e pressionado na parte inferior do aparelho de ostomia
- **Adaptador** - O adaptador se encaixa no Invólucro, fora do aparelho de ostomia.
- **Grampo** - O clipe é usado fora do aparelho de ostomia, para prender o tubo de alimentação no lugar depois de instalado a jusante.


**Habitação**



**Grampo**



**Adaptador**

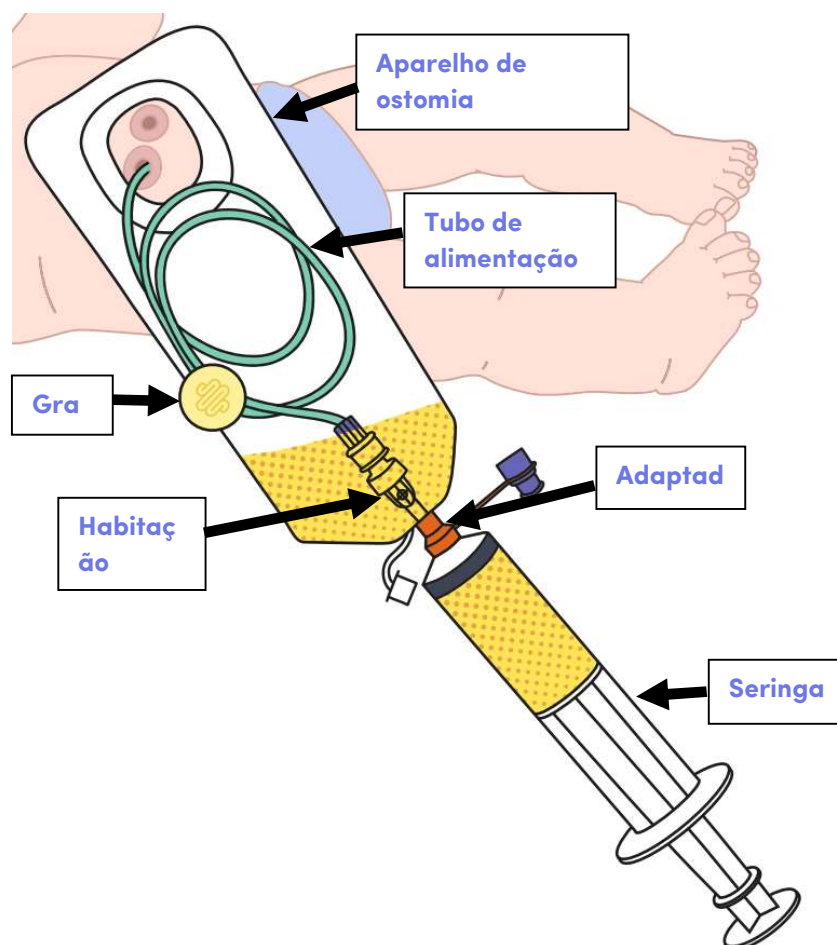

## Usando é The Insides® Neo

As informações a seguir irão orientá-lo sobre o que você espera ver quando a equipe de enfermagem usar o Insides® Neo com seu bebê.

### Configurar

- A enfermeira irá montar o Insides® Neo, acoplá-lo ao tubo de alimentação e enfiar tudo no aparelho de ostomia.
- Eles removerão o antigo aparelho de ostomia, limparão a pele e aplicarão a placa de base do novo aparelho de ostomia na pele do bebê.
- Em seguida, eles anexarão cuidadosamente a bolsa do aparelho de ostomia à placa de base na pele do bebê e enfiarão o tubo de alimentação no estoma distal.
- Assim que o tubo estiver no lugar, eles aplicarão o clipe para prender o tubo na frente do aparelho de ostomia.

### Reinfusão do Quimo

- A enfermeira esperará que o aparelho de ostomia do bebê se encha de quimo. Isso pode levar de 4 a 6 horas.
- Assim que o aparelho de ostomia estiver 1/3 cheio, eles anexarão uma seringa e sugarão o quimo através do invólucro/adaptador para a seringa e removerão o excesso de ar da seringa. Eles então farão uma de duas coisas com a seringa cheia de quimo:
  - Pressione o êmbolo da seringa e reinfunde o quimo no tubo de alimentação
  - Coloque a seringa em uma bomba de infusão de seringa e a máquina reinfundirá lentamente o quimo de seu bebê por 4 a 6 horas no tubo de alimentação.
- Esse processo é repetido, garantindo que todo o quimo que seu bebê passa para o aparelho de ostomia seja reinfundido a jusante.

### Usar

- The Insides® Neo pode ser usado por até quatro (4) dias antes de precisar ser trocado.

### Notas

Use esta área para anotar pensamentos ou perguntas para sua equipe de saúde.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---